



## SCHUH-& FUSS-FORUM

# GEBRAUCHSANWEISUNG EINLAGEN

Ihre Einlagen sind eine Sonderanfertigung im Sinne der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (MDR). Die physikalisch angewandten Einlagen dienen einem medizinischen Zweck, wobei folgende Hinweise zu beachten sind:

- Bevor Sie Ihre Einlagen verwenden, sind ggf. im Schuh eingeklebte Fußstützen zu entfernen, um die Einlagen richtig positionieren zu können.
- Damit sich Ihr Fuß an das neue Fußbett gewöhnen kann, ist die Tragezeit langsam zu steigern.
- Sollte es trotz der Eingewöhnungsphase zu Problemen mit der Passform kommen, vereinbaren Sie bitte umgehend einen Termin bei uns.
- Je nach Beanspruchung empfiehlt es sich, die Einlagen nach etwa 1 Jahr zu erneuern.
- Bei Kindern ist insbesondere auf das Wachstum zu achten. Sobald Ihr Kind eine neue Schuhgröße hat, sind gleichzeitig neue, individuell angefertigte Einlagen erforderlich.
- Nehmen Sie Ihre Einlagen nach dem Tragen zum Trocknen aus den Schuhen. Legen Sie Ihre Einlagen dazu jedoch nicht an oder auf eine Heizung, da sich sonst die Passform der Einlagen verändern kann.

### Gerne beantworten wir auch persönlich Ihre Fragen zu

- Gebrauch und etwaigen Einschränkungen
- Handhabung, Funktionsweise, Risiken
- Reinigung, Desinfektion, Pflege
- medizinisch/therapeutischen Aspekten
- Materialien und Zubehör
- Entsorgung und Umweltschutz

## SCHUH-& FUSS-FORUM

KOPPERT · INGERL · WARTNER GBR

Orthopädieschuhtechnik · Orthopädietechnik · Podologie

**München**, Adlzreiterstraße 4 · **Poing**, Neufarner Straße 1  
**Ismaning**, Bahnhofstraße 17 · **Forstern**, Hauptstraße 3 · **Ebersberg**, Sieghartstraße 27

☎ 08121 / 22 32 80